

ベッド上で洗髪と清拭が簡単にできる画期的スチーマー

*Lápre*

*Shampoo Steamer*

ラプレシャンプースチーマー総合パンフレット





# 長期入院や介護が必要で入浴が困難な方にベッド上で 簡単、短時間で洗髪や清拭をしていただけます。

ラプレシャンプースチーマーシステムは「シャンプーはお湯で流す」「清拭はホットタオルで」という常識を覆し、温かくて周囲を濡らさない特殊スチーム※で洗髪や清拭をする全く新しい入浴コンセプトです。

従来のアルコール主成分のドライシャンプーとは異なり、特殊スチームで皮脂成分を浮かし専用シャンプー・専用ボディソープで洗浄効果を高めて頭皮やお肌にスッキリ感を与えます。また保温効果が強いスチームで本当に「お風呂に入って温まった」「温かいシャワーを浴びた」感触が得られます。

またこのシステムは介護者・要介護者・施設など現場に関わる全ての方に新しい入浴スタイルを提供し、現状の看護・介護環境に様々な変化や改善をもたらします。

※「潜熱」と言うエネルギーを有するスチームです。水が水蒸気へと状態変化するとき、温度はそのままですが、潜熱(気化熱)という熱量(熱エネルギー)によって変化します。この熱量の変化を利用し、体感以上の熱を利用したものが、特殊スチームです。

## 介護者の負担減

多くの準備物が不要で、施術は1人でかつ短時間で完了。準備時間の削減や人手不足の解消に繋がります。

## 要介護者の負担減

ベッド上で寝たままや座位で施術可能。要介護者の身体的負担軽減につながります。

*Lápre*  
Shampoo Steamer System

## 施設の経費削減

防水対策の消耗品が不要になり経費削減に繋がり、また介護時間短縮により業務効率化が可能に。



## 特長



### ■ベッド上で洗髪と清拭

要介護者はベッド上で寝たまま、介護者は一人で簡単に、短時間で洗髪や清拭ができるシステムです。周囲を濡らさない特殊スチーム効果でベッドの上や周囲に大掛かりな防水対策をする必要はありません。

### ■入浴時と同じ爽快感

特殊スチームの温度は入浴時の温水シャワーと同様の温度。かつ快適な熱量を豊富に有しています。そのため温水シャワーよりも高い保湿・保温効果があり、入浴をしたような爽快感が得られます。

## ご使用プロセス【清拭】



### Step 1 スチームを当てる【皮膚の膨潤】

特殊スチームを体の洗浄部へ約 30 秒間当て、皮膚を膨潤させます。スチームが皮膚や毛穴の皮脂汚れを浮かせ、ボディソープの洗浄効果を高めます。



### Step 2 スチームでタオルを温める【清拭用タオルの準備】

軽く湿らせたタオルに特殊スチームを約 30 秒間当て、タオルを温めます。温めたタオルに専用ボディソープを適量プッシュします。



### Step 3 体を洗う【汚れを浮かす】

ボディソープをつけたタオルで体を軽く拭き、拭いた部分にスチームを約 1 分間当てます。特殊スチームとボディソープの相乗効果で、皮脂汚れをより浮かせます。



### Step 4 タオルで拭き取り【汚れを取り除く】

乾いたタオルでスチームを当てた場所を拭き取ります。特殊スチーム効果で浮き上がった皮脂汚れは、簡単に拭き取ることができます。



### Step 5 再度スチームを当てる【仕上げ】

再びスチームを 1 分間当て、わずかに残った皮脂汚れを乾いたタオルで拭き取って仕上げます。



## ■優れた洗浄力

特殊スチームの熱量で頭皮や皮膚を膨潤させて皮脂汚れを浮かし、さらに専用シャンプーや専用ボディソープ組み合わせることで洗浄力を高め、一般のシャンプーやボディソープとほぼ変わらない優れた洗浄効果を発揮します。



洗髪前



特殊スチーム洗髪後

## ご使用プロセス【洗髪】



### Step 1 スチームを当てる【熱で毛穴を広げる】

特殊スチームを髪全体へ約2分間当てて、髪と頭皮を濡らします。スチームの熱で毛穴を開き、皮脂を浮かせます。洗浄効果を高める準備ステップです。



### Step 2 洗髪とマッサージ【汚れを浮かす】

専用シャンプーを髪へ塗布して髪と頭皮になじませます。髪と頭皮を揉み洗いするようにして洗髪します。(シャンプー使用量は短髪で約10プッシュです。)



### Step 3 スチームを当てる【シャンプーへ汚れ成分を溶かし込み】

再びスチームを約2分間、髪全体に当ててシャンプーに皮脂などの汚れを溶かし込みます。



### Step 4 タオルで拭き取り【汚れを取り除く】

乾いたタオルでシャンプーを拭き取ります。Step 3と4を再び繰り返して、残った汚れを拭き取ります。

※コンディショナーを使用する場合は、Step 4の後に専用コンディショナーを塗布してStep 3, 4を行います。



### Step 5 ヘアードライヤーによるドライ【仕上げ】

ヘアードライヤーで髪を乾かし、ブラッシングして仕上げます。



## シャンプースチーマーシリーズ 製品構成



シャンプースチーマー AT



シャンプースチーマー MA



専用シャンプー / 専用コンディショナー



専用ボディーソープ

### シャンプースチーマー AT

- 給水タンクに水を入れることで、連続でスチームを使用することが可能。1日に多人数を施術する病院や介護施設に適しています。
- 軟水器搭載で、注入した水を軟水化。軟水特殊スチームによる効果で、洗髪では柔らかい髪質感に仕上がりに、清拭では肌触りの良さが際立ちます。

### シャンプースチーマー MA

- 持ち運びに便利な小型軽量仕様で、訪問介護や訪問美容などに適しています。
- 水1リットルを入れ、1～2人を施術できる程のスチームを噴霧可能。

### 専用シャンプー

### 専用コンディショナー

### 専用ボディーソープ

- 天然由来成分主体の低刺激性。肌の弱い方でも安心してご利用頂けます。
- シャンプーとコンディショナーはボトル（200cc）と詰替用（1000cc）を用意。
- ボディーソープはボトル（400cc）と詰替用（1000cc）を用意。



## 製品仕様

		ラプレ シャンプースチーマー AT	ラプレ シャンプースチーマー MA
製品仕様	定格電圧、周波数	単相 AC100V 50Hz/60Hz	単相 AC100V 50Hz/60Hz
	最大消費電力	1.2KW	1.0KW
	セーフティー機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>加熱タンクの温度異常検知機能</li> <li>加熱タンクの圧力異常時の強制リリース機能</li> <li>機械転倒検知機能</li> <li>長押し操作機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>加熱タンクの温度異常検知機能</li> <li>加熱タンクの圧力異常時の強制リリース機能</li> <li>機械転倒検知機能</li> <li>長押し操作機能</li> </ul>
	本体寸法	スチーマー本体寸法 W220mm×D380mm×H370mm 専用ワゴンに載せた寸法 W300mm×D440mm×H1000mm	スチーマー本体寸法 W230mm×D260mm×H325mm
	本体重量	スチーマー本体 12Kg 専用ワゴン 10Kg	スチーマー本体 6Kg
オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水容器 (5リットルタンク)</li> <li>軟水カートリッジ</li> <li>スチーマータンク洗浄液</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水容器 (5リットルタンク)</li> <li>スチーマータンク洗浄液</li> </ul>	

※記載している仕様ならびにデザインなどは予告なしに変更することがあります。

販売店

【製造元】

**Tip 21** 株式会社 **ティ.アイ.プロス**

〒611-0041 京都府宇治市槇島町落合 144-7

TEL : 0774-28-5778 FAX : 0774-28-5772

<https://www.tipros.co.jp/>

## ラプレシャンプースチーマー使用・活用方法を配信中



介護士による洗髪・清拭の様子やレクチャー動画を配信しています  
QRコードもしくは検索ワードからご視聴いただけます

ラプレ介護チャンネル

検索

